

1222·2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Istruzione operativa: DPI per Addetti al Primo Soccorso

Redazione a cura dell'Ufficio Ambiente e Sicurezza

Ed. 0 – Febbraio 2020

SOMMARIO

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2	RIFERIMENTI	2
3	I DPI PER GLI ADDETTI AL "PRIMO SOCCORSO" DI ATENEO	2
3.1	Il kit di DPI	2
3.2	Modalità di utilizzo dei DPI	2
4	ISTRUZIONI D'USO	3
4.1.	La mascherina monouso	3
4.2	Gli occhiali di protezione	3
4.3	I guanti monouso	4
5	SINTESI DELLE RESPONSABILITÀ	5

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La seguente procedura è finalizzata ad evitare i rischi di contaminazione biologica negli interventi di primo soccorso e a fornire agli “Addetti al Primo Soccorso” le istruzioni per il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale - DPI messi a loro disposizione.

2 RIFERIMENTI

Direttiva n° 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della nota del MUR n. 5988 del 26 febbraio 2020, in attuazione del DPCM 25 febbraio 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

3 I DPI PER GLI ADDETTI AL “PRIMO SOCCORSO” DI ATENEO

3.1 Il kit di DPI

Il kit dei DPI messi a disposizione degli addetti al “Primo Soccorso” di Ateneo, in relazione anche a quanto indicato in relazione alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è composto da:

- mascherina FFP2
- occhiali di protezione
- guanti monouso

3.2 Modalità di utilizzo dei DPI

I DPI vanno indossati:

- quando si presta soccorso ad una persona che presenta sintomi di malattie respiratorie o infettive (febbre, tosse, vomito ecc.)
- in caso di possibile contatto con sangue od altro liquido biologico (presenza di ferite, ustioni, ecc.)
- quando la cute delle proprie mani presenta lesioni

I DPI NON vanno indossati:

- durante le consuete attività lavorative quotidiane, a meno che l'uso non sia già previsto dalle disposizioni di sicurezza relative alla specifica mansione svolta
- quando si presta soccorso ad una persona che NON presenta sintomi di malattie respiratorie o infettive (febbre, tosse, vomito ecc.) e NON vi sia possibile contatto con sangue od altro liquido biologico (presenza di ferite, ustioni, ecc.)
- in ogni altro caso per il quale non sia espressamente previsto l'uso del DPI

I DPI vanno indossati con la seguente successione:

1. mascherina monouso
2. occhiali di protezione
3. guanti monouso


I DPI vanno rimossi con la seguente successione:

4. occhiali di protezione
5. mascherina monouso
6. guanti monouso

4 ISTRUZIONI D'USO

4.1. La mascherina monouso

Le corrette modalità e le fasi per indossare la mascherina monouso vengono illustrate di seguito:

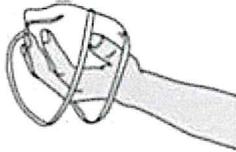

1) Tenere il fasciale filtrante in mano con stringinaso verso le dita ed elastici sotto la mano.



2) Portare il respiratore al mento con lo stringinaso verso l'alto; quindi portare il passante superiore dietro il capo e posizionarlo al di sopra delle orecchie. Nello stesso modo posizionare il passante inferiore al di sotto delle orecchie, attorno al collo.



3) Con la pressione delle dita adattare lo stringinaso alla forma del naso.



4) Al fine di verificare il corretto posizionamento del respiratore provvedere a:

- coprirlo con le mani adattandolo il più possibile al viso,
- soffiare aria verso l'esterno. Se l'aria esce attorno il naso, stringere il fermaso e/o regolare i passanti elastici se l'aria esce dai bordi.

Per togliere il respiratore afferrare con le mani i passanti elastici nella posizione centrale (vicino alle orecchie) e tirarli lungo la nuca.


La mascherina è monouso e pertanto deve essere eliminata subito dopo l'utilizzo; non deve mai essere abbassata sul collo.

La tenuta della mascherina può essere compromessa se indossata da personale con barba.

Smaltire la mascherina monouso nel rifiuto indifferenziato, avendo cura di chiudere il sacco.

4.2 Gli occhiali di protezione

Gli occhiali di protezione vengono forniti al fine di proteggere gli occhi da eventuali schizzi o spruzzi di sangue o altri liquidi biologici.

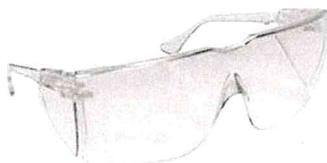

Gli occhiali, dopo l'uso, vanno lavati con sapone neutro e riposti al riparo della luce diretta.

4.3 I guanti monouso

I guanti monouso non sterili sono dispositivi utilizzati nell'ambiente di lavoro per proteggere il lavoratore da possibili contatti con materiale biologico, riducendo così l'incidenza di contaminazione delle mani.

Affinché l'uso dei guanti sia efficace e garantisca quindi una corretta barriera al rischio di trasmissione delle infezioni, devono essere osservate alcune regole di vestizione, utilizzo e rimozione.

Prima di indossare i guanti:


- rimuovere anelli, braccialetti e orologi da polso
- assicurarsi che le mani siano perfettamente asciutte
- verificare che i guanti siano della misura giusta (né troppo larghi né troppo stretti)

Durante e dopo l'intervento di assistenza:

- non toccarsi il volto, i capelli, né sistemarsi gli occhiali
- non toccare oggetti di uso comune come telefoni, porte, maniglie, ascensori, computer, ecc. con i guanti contaminati

Rimozione del guanto:

- rimuovere il primo guanto partendo sempre dal polso rivoltandolo dall'interno verso l'esterno e tenerlo nella mano che indossa ancora il guanto;
- rimuovere il secondo guanto afferrandolo dall'interno nella zona del polso e rovesciarlo facendo rimanere all'interno il primo guanto tolto in precedenza;

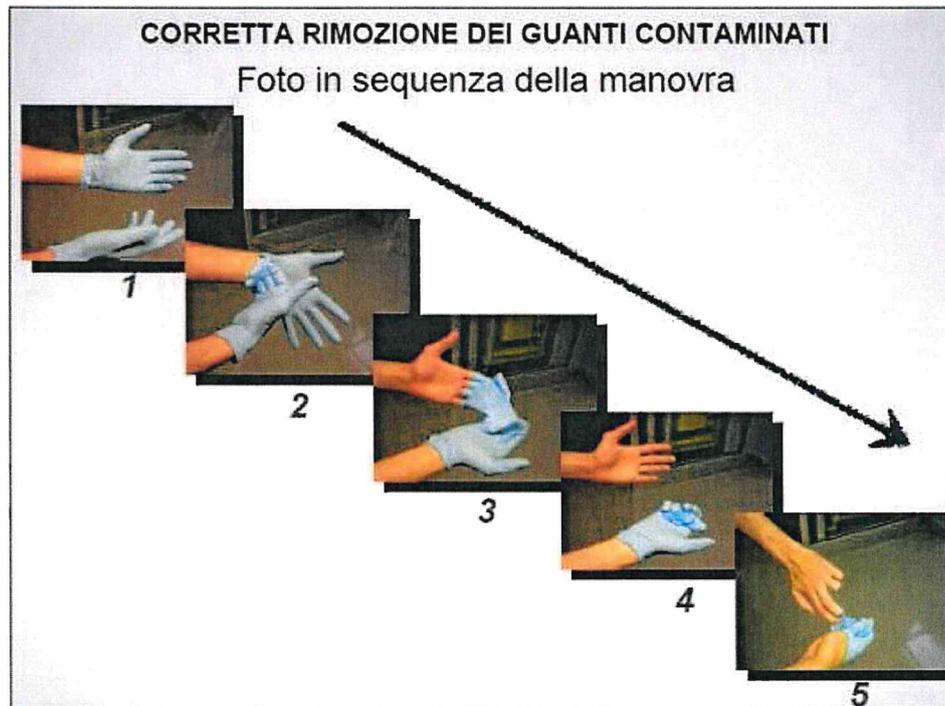

- **NON** riutilizzare i guanti monouso: dopo l'uso i guanti vanno sempre gettati
- smaltire i guanti nel rifiuto indifferenziato, avendo cura di chiudere il sacco
- lavarsi accuratamente le mani come di seguito indicato in tabella

Come lavarsi le mani?

Lavare le mani quando sono sporche, oppure utilizzare le salviettine monouso

Durata della procedura: 40-60 secondi



Fonte: World Health Organization

5 SINTESI DELLE RESPONSABILITÀ

Attività	Responsabile	Collabora
Distribuzione al personale dei DPI	Responsabili di Struttura/Dirigente di Area	-----

WWW.UNIPD.IT
