

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA


---

# Istruzione operativa: Utilizzo DPI per contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Virus SARS- CoV-2

Ed. 01 – Aprile 2020

## SOMMARIO

1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2 - RIFERIMENTI	3
3 - ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEI DPI	3
<b>3.1 Mascherina monouso</b>	<b>3</b>
<b>3.2 I guanti monouso</b>	<b>5</b>

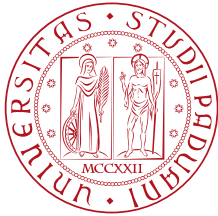

## 1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La seguente procedura è finalizzata a fornire le istruzioni per l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) messi a disposizione ai dipendenti dell'Ateneo per prevenire il contagio, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Virus SARS- CoV-2.

In particolare vengono descritti l'uso di mascherina chirurgica e guanti monouso.

## 2 - RIFERIMENTI

Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, Art. 16 - Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività, comma 1.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", Allegato 6 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" del 24 aprile 2020, punto 6 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

## 3 - ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEI DPI

Il kit dei DPI messi a disposizione, in relazione anche a quanto indicato in relazione alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è composto da:

- mascherina chirurgica;
- guanti monouso.

**I DPI vanno indossati con la seguente successione:**

1. mascherina monouso
2. guanti monouso

**I DPI vanno rimossi con la seguente successione:**

1. guanti monouso
2. mascherina monouso

### 3.1 Mascherina monouso


Le mascherine medico-chirurgiche costituiscono un'utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea.

Di seguito sono elencate le fasi per indossare e rimuovere nel modo corretto la mascherina monouso.

Per **INDOSSARE** la mascherina:

**Pulire le mani.** Prima di utilizzare una mascherina nuova, lavare con cura le mani con acqua e sapone.


**Controllare la mascherina.** Verificare che la mascherina non presenti difetti (buchi o strappi) nel materiale. Se la mascherina è difettosa, sostituirla.

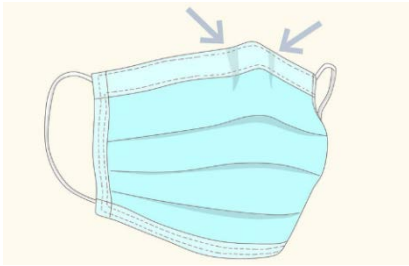

**Orientare la mascherina nella maniera corretta.** Assicurarsi che il bordo modellabile sia rivolto verso l'alto prima di applicare la mascherina sul viso.

**Assicurarsi che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l'esterno.** Il lato interno è solitamente bianco; il lato esterno ha invece un colore diverso. Prima di applicare la mascherina, assicurarsi che il lato bianco sia rivolto verso il viso.


**Mettere la mascherina sul viso.** Esistono molti tipi di mascherina, ciascuno con modalità di applicazione diverse:

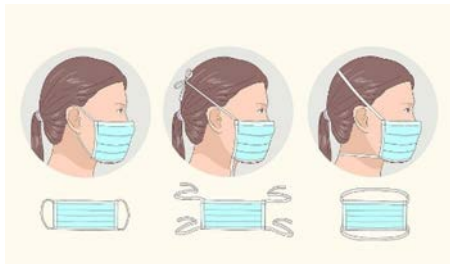


**Anelli alle orecchie** - alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato. Prendere la mascherina per gli anelli, metterne uno intorno a un orecchio e poi mettere il secondo sull'altro orecchio.

**Lacci** - alcune mascherine hanno dei lacci (superiori e inferiori) che vanno legati dietro la testa. Prendere la mascherina dai lacci presenti sulla parte superiore, portarli dietro la testa e legarli insieme con un fiocco.


**Fasce elastiche** - alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno applicate intorno alla testa e alla nuca. Tenere la mascherina davanti al viso, tirare la fascia superiore e metterla intorno alla parte superiore della testa. Tirare poi la fascia inferiore sulla testa e sistemala alla base della nuca.

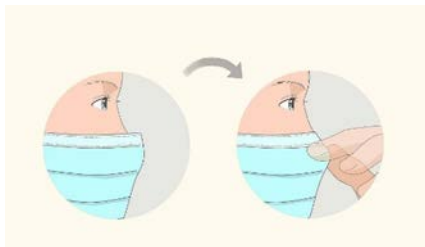

**Sistemare la parte sul naso.** Una volta messa in posizione sulla testa e sul viso, usare indice e pollice per stringere la porzione flessibile del bordo superiore della mascherina intorno al ponte del naso.

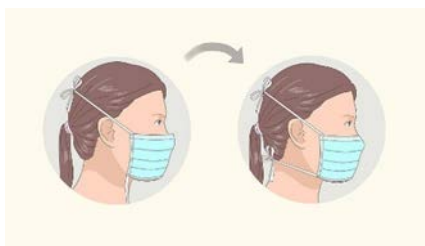


**Annodare la fascia inferiore della mascherina (se necessario).** Se si sta usando una mascherina con le fasce che si legano sopra e sotto, si possono ora annodare quelle inferiori intorno alla nuca. Se si erano già legate prima, potrebbe essere necessario riannodarle più saldamente.

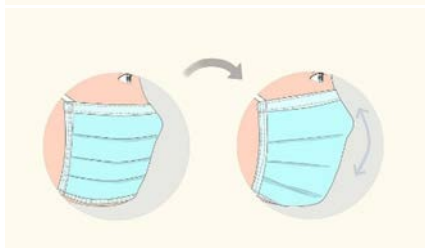

**Sistemare la mascherina sul viso e sotto il mento.** Una volta stabilizzata, sistemarla per assicurarsi che copra viso, bocca e che il bordo inferiore sia sotto il mento.

La mascherina è monouso e pertanto deve essere eliminata subito dopo l'utilizzo.

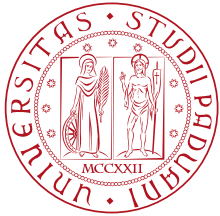

Per **RIMUOVERE** la mascherina:

**Pulire le mani.** Prima di rimuovere la mascherina lavare le mani o, se si indossano guanti protettivi, rimuovere i guanti, quindi lavare le mani e infine rimuovere la mascherina.


**Rimuovere la mascherina con cautela.** Togliere la mascherina toccando solamente i bordi, i lacci, o gli anelli. Evitare di toccare la parte anteriore della mascherina, in quanto potrebbe essere contaminata.

*Anelli alle orecchie* - usare le mani per tenere gli anelli e rimuoverli da ciascun orecchio;

*Lacci* - slegare prima i lacci del lato inferiore e poi quelli del lato superiore. Rimuovere la mascherina tenendo i lacci del lato superiore;

*Fasce elastiche* - usare le mani per portare la fascia inferiore sulla testa, quindi fare la stessa cosa con la fascia elastica superiore. Rimuovere la mascherina dal viso mentre si tiene la fascia elastica del lato superiore.

**Gettare la mascherina rispettando le norme di sicurezza.** Le mascherine rimosse vanno gettate: in un ambiente medico o di laboratorio è probabile che vi sia un contenitore specifico per tale tipologia di rifiuto;

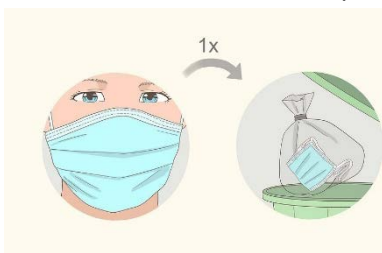

in contesti diversi, quali gli uffici amministrativi, guanti e mascherine usate possono essere gettati nel contenitore del secco indifferenziato. Per una maggiore cautela si consiglia di raccogliere i dispositivi rimossi in un sacchetto dedicato e una volta chiuso gettarlo nel bidoncino dell'indifferenziato.

**Lavarsi nuovamente le mani.** Una volta gettata la mascherina secondo le norme di sicurezza, lavarsi le mani ancora una

volta per assicurarsi che siano pulite e che non siano contaminate dal contatto con la mascherina sporca.

### 3.2 I guanti monouso

I guanti monouso non sterili sono dispositivi utilizzati nell'ambiente di lavoro per proteggere il lavoratore da possibili contatti con materiale biologico, riducendo così l'incidenza di contaminazione delle mani.

Affinché l'uso dei guanti sia efficace e garantisca quindi una corretta barriera al rischio di trasmissione delle infezioni, devono essere osservate alcune regole di vestizione, utilizzo e rimozione.

**Prima di indossare i guanti:**


- rimuovere anelli, braccialetti e orologi da polso
- assicurarsi che le mani siano perfettamente asciutte
- verificare che i guanti siano della misura giusta (né troppo larghi né troppo stretti)

**Durante e dopo l'uso:**


- non toccarsi il volto, i capelli, né sistemarsi gli occhiali

### Rimozione del guanto:

- rimuovere il primo guanto partendo sempre dal polso rivoltandolo dall'interno verso l'esterno e tenerlo nella mano che indossa ancora il guanto;
- rimuovere il secondo guanto afferrandolo dall'interno nella zona del polso e rovesciarlo facendo rimanere all'interno il primo guanto tolto in precedenza;

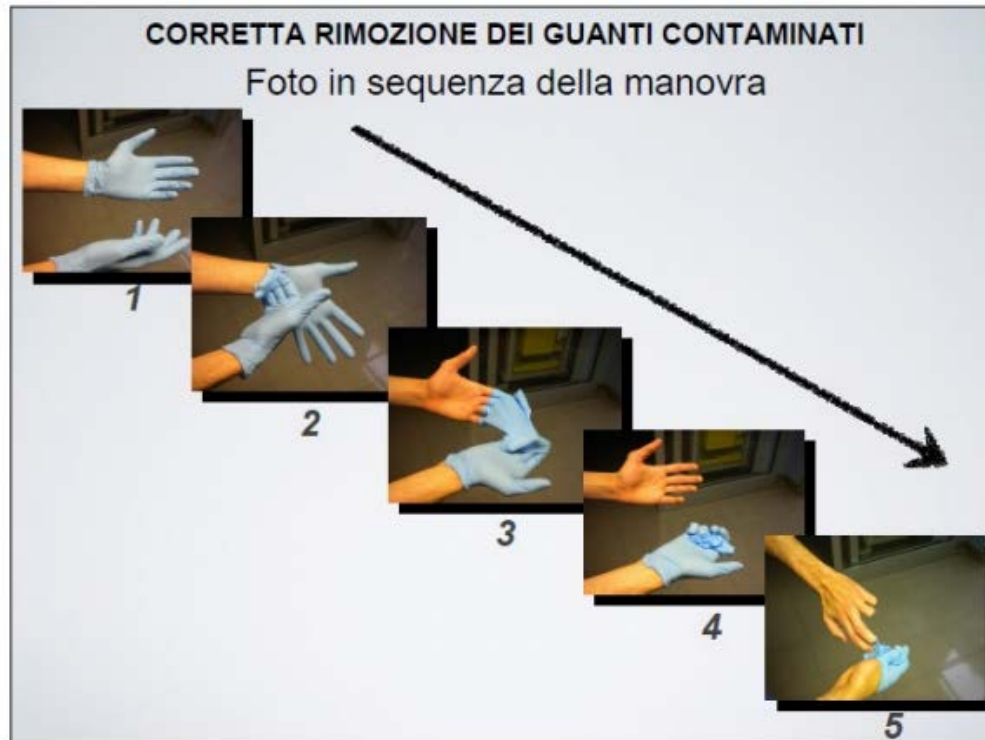

- NON riutilizzare i guanti monouso: dopo l'uso i guanti vanno sempre gettati
- smaltire i guanti nel rifiuto indifferenziato, per una maggiore cautela si consiglia di raccogliere i dispositivi rimossi in un sacchetto dedicato e una volta chiuso gettarlo nel bidoncino dell'indifferenziato.
- lavarsi accuratamente le mani come di seguito indicato in tabella "Come lavarsi le mani".

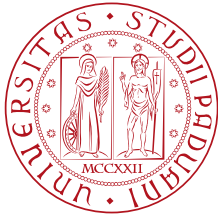

# Come lavarsi le mani?

Lavare le mani quando sono sporche, oppure utilizzare le salviettine monouso

Durata della procedura: 40-60 secondi



[WWW.UNIPD.IT](http://WWW.UNIPD.IT)